



Vakuummatten für OP-Lagerung




Vakuum-Matratzen und -Kissen für Positionierung und Lagerung der Patienten während der Operation

- Passt sich der Körperkontour an
- Optimale Druckentlastung
- Einfaches, schnelles und sicheres Handling

VORTEILE:

- Vermeidung von Folgeschäden wie Dekubitus und Paresen
- Optimaler Zugang für den Chirurgen zum Operationsfeld
- Exzellenter Komfort für den Patienten
- Verbesserte Effizienz im OP-Raum
- Ermöglicht interklinische Transporte in definierter OP-Lage

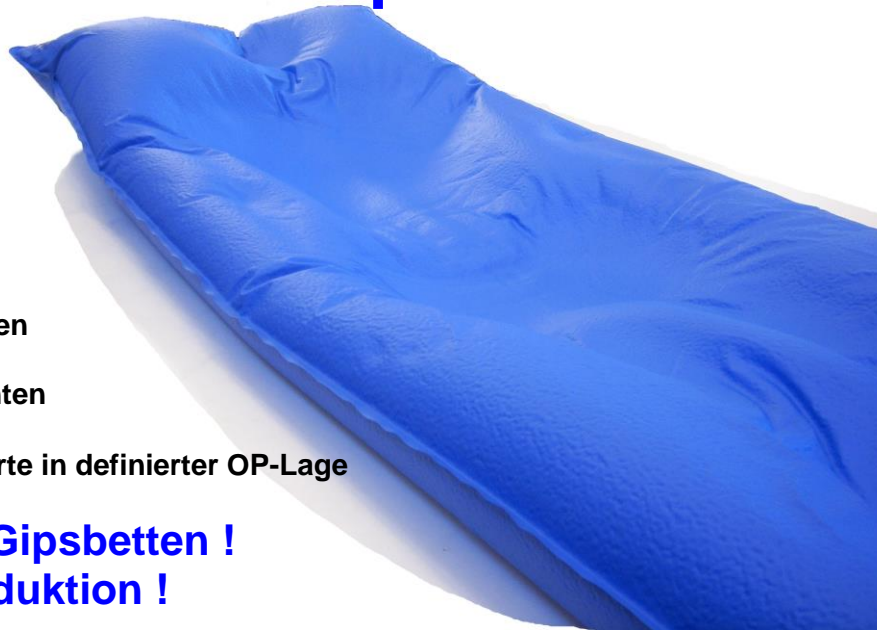

**Die moderne Alternative zu Gipsbetten !
- bietet eine große Kostenreduktion !**

Indikationen zur Anwendung des MedVac Vakuumsystems während Operationen:

- Seitenlage
- Halbseitenlage
- Rückenlage
- Sitzende / halbsitzende Position
- Schraubenlage
- Steinschnittlage
- Laparoskopische Lagerungen


Gebrauch:

- Das innere Granulat soll gleichmäßig verteilt werden
- Die Matte geringfügig vakuumisieren
- Den Patienten auf die OP-Matte legen
- Etwas Luft in die Matte einlassen
- Den Patienten in die gewünschte Position bringen
- Luft absaugen bis die Matte fest ist

Eigenschaften aller MedVac Produkte:

Außenhülle aus Spezial-TPU-Film:

- Sehr strapazierfähiges Material - garantiert hohe Lebensdauer
- Seidenweich und angenehm für den Patienten
- Einfach zu reinigen und zu desinfizieren
- Biokompatibel, Frei von PVC und Latex

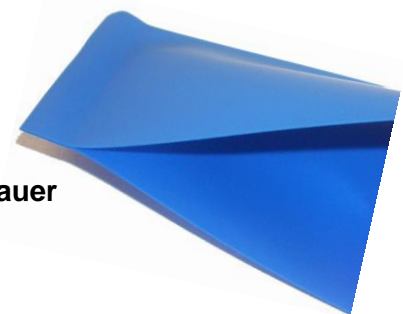

Vakuumventile schließen automatisch

- Die robusten Vakuumventile schließen automatisch nach dem Absaugen
- Kein Vakuumverlust



Kennzeichnung:


- Etikett mit Seriennummer und CE-Kennzeichnung
- Optionales Etikett mit Bedienungsanleitung des Ventils
- Optionale Etiketten mit Eigentumskennezeichnung

Röntgen-, CT- und MRI-kompatibel. CE-gekennzeichnet




MedVac OP-Matratzen und OP-Kissen

OP-Matratzen, Körpergröße:

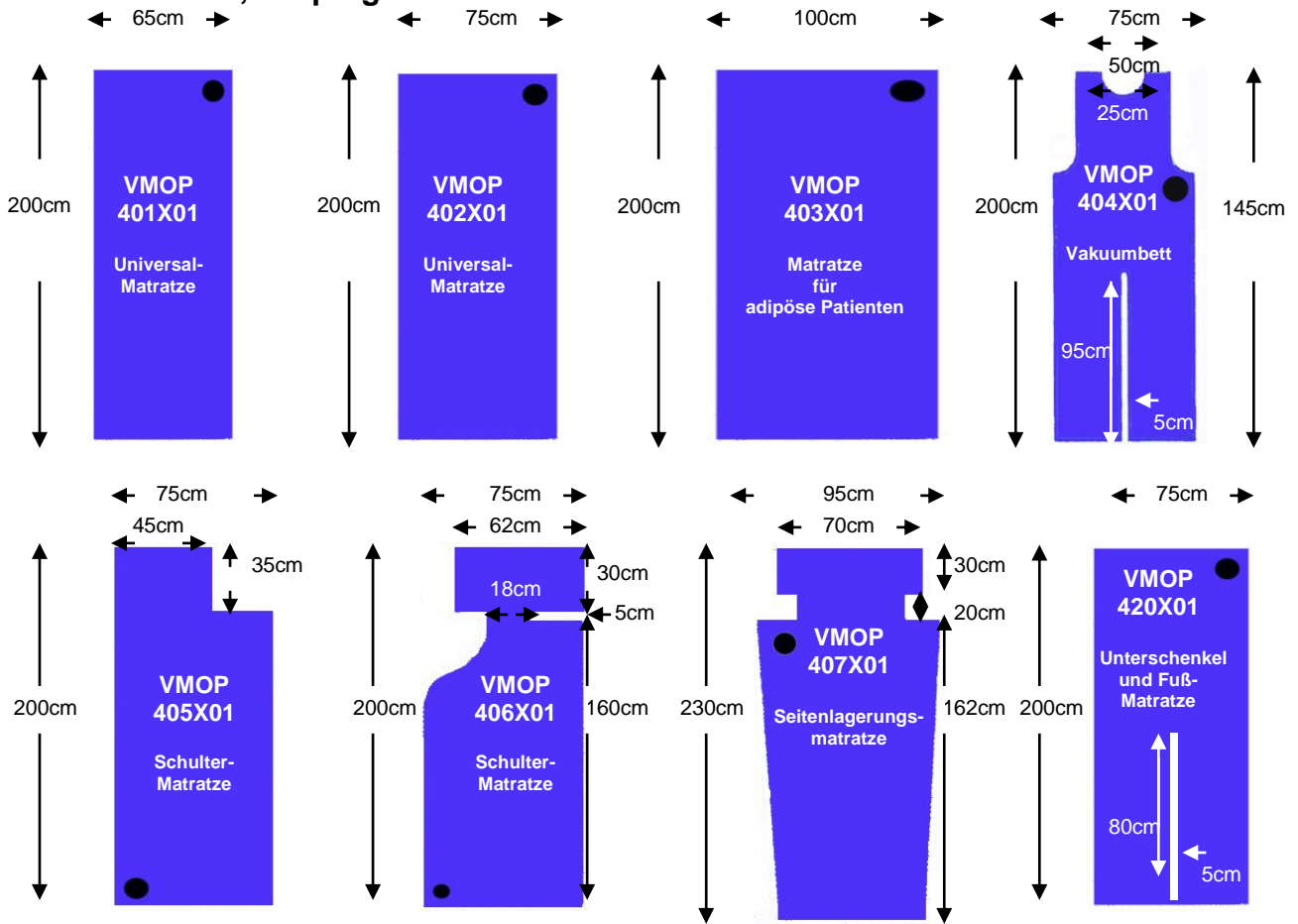


OP-Matratzen, kurz:

Kurze Matratzen mit Ausschnitt: Kurze Matratzen:

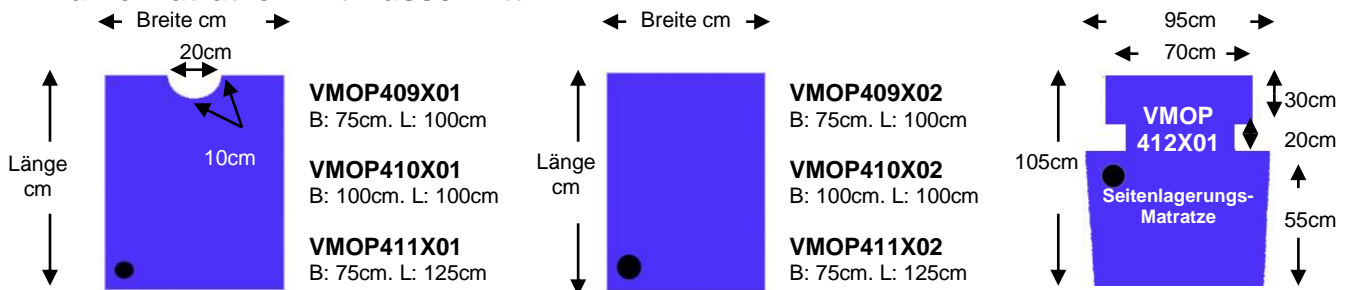

OP-Kissen:

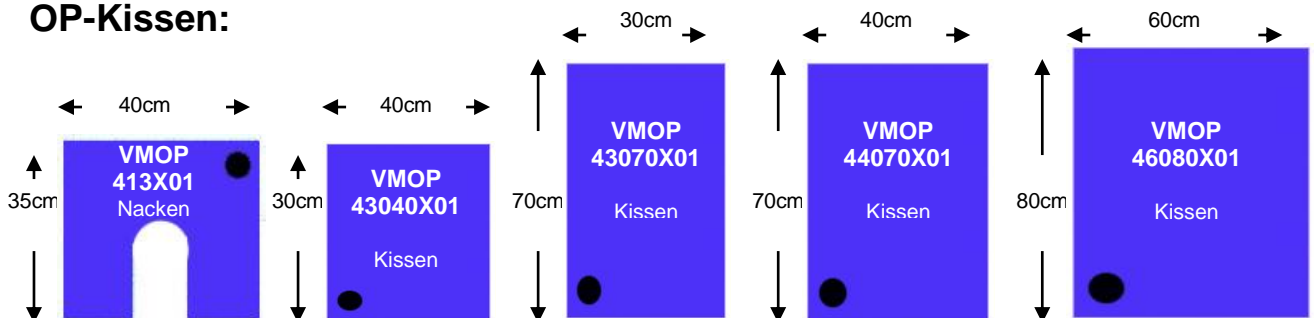

The logo for Kohlbrat & Bunz features the company name in a bold, black, sans-serif font. The ampersand is enclosed in a red oval. The entire logo is framed by a large, red, curved swoosh that starts above the 'K' and ends below the 'Z'.

KOHLBRAT & BUNZ

*Medical Products
Made in Austria*

**Qualitätsmanagement gemäß
EN ISO 9001 & EN ISO 13485
zertifiziert durch TÜV Austria**



made by

**KOHLBRAT & BUNZ GMBH
Loretostrasse 4-8
A-5550 Radstadt, Österreich
T: +43-(0)6452-7193-0
F: +43-(0)6452-7193-51
E: office@kohlbrat-bunz.com
www.K-B.at**